



E-MOTION®

POGONSKI PRIPOMOČEK ZA INVALIDSKE
VOZIČKE

**MOČ V
VAŠIH
ROKAH.**



ZMOGLJIVO. LAHKO.
ODLIČNO ZASNOVANO.

PREPROSTEJE PREMIKANJE

Koncept koles e-motion je izjemno preprost: pogonski kolesi e-motion lahko prek dveh komaj opaznih vmesnikov namestite na skoraj vse invalidske vozičke. Senzorji, vgrajeni v potisna obroča, izmerijo premike med vožnjo in vam zagotovijo želeno moč motorja. Tako lahko invalidski voziček premikate, krmilite in zaustavite z zelo majhnim naporom. Posamezno pogonsko kolo je težko le 7,8 kg, kar pomeni, da je e-motion eden najlažjih aktivnih pogonskih dodatkov, ki je na voljo.

e-motion je združljiv s skoraj vsemi standardnimi invalidskimi vozički: preprosto zamenjajte kolesa

●●● IZDELANO V NEMČIJI





IZKORISTITE
SVOJ DAN

BODITE NEODVISNI IN OSTANITE GIBLJIVI

e-motion omogoča dodatno potisno silo, ki jo potrebujete, da samostojno premagate vsakdanje, a tudi nevsakdanje življenjske izzive. Podporna hitrost do 8,5 km/h* vam bo omogočila izjemno premikanje. Zaradi vgrajenega litij-ionskega akumulatorja je največji doseg izdelka e-motion 25 km, zato vam ni treba skrbeti za vmesno polnjenje in lahko popolnoma uživate v svoji neodvisnosti.

*6 km/h pri standardni različi. 8,5 km/h s paketom Mobility Plus. Več informacij je na voljo na 16. strani.



Moderna in izjemno učinkovita tehnologija motorja e-motion zagotavlja največji moment za tihi in lahki pogonski kolesi

Vgrajen modul Bluetooth za komunikacijo z daljinskim upravljalnikom ECS ali pametnim telefonom

Litij-ionski akumulator za največji doseg in dolgo življenjsko dobo




BODITE **V FORMI** IN **AKTIVNI**

OSVOJITE PRAZNE PROSTORE

Naj gre za daljše razdalje, klance ali nekoliko kilogramov težjo prtljago: e-motion vas podpira v vsaki situaciji, tudi pri zaviranju po klancu navzdol. To zagotavljata njegova izjemno učinkovita in prijetno tiha električna motorja. e-motion omogoča, da razširite radij svojega delovanja, nadaljujete s premikanjem in trenirate življenjsko pomembne funkcije. Obenem pa svoje mišice in sklepe ščitite od preobremenjenosti. Na ta način boste do cilja prispeli sproščeni in še vedno aktivni.



SPROŠČENO ČEZ DAN

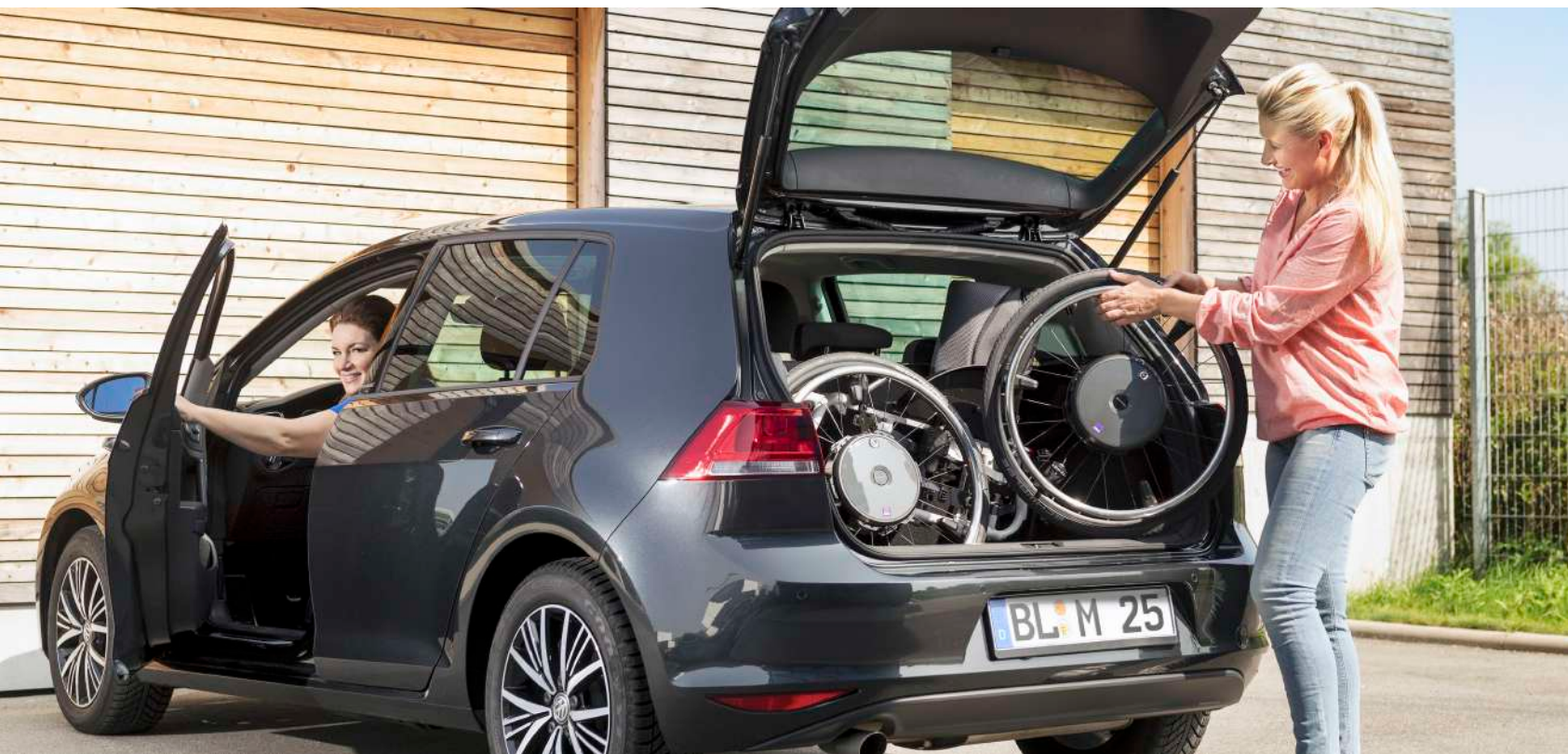

Lahki pogonski kolesi e-motion je mogoče enostavno odstraniti z invalidskega vozička v zelo kratkem času in lahko jih naložite v skoraj vsak avtomobilski prtljažnik.

POPOLN SOPOTNIK ZA VSAKODNEVNO ŽIVLJENJE

Ne glede na to, ali ste v službi, nakupujete ali uživate v svojem prostem času: e-motion je izjemno okreten in v vseh situacijah ga je mogoče upravljati tako enostavno kot ročni invalidski voziček. Kolesi e-motion lahko z eno potezo odstranite z invalidskega vozička in naložite v kateri koli prtljažnik. Z istim invalidskim vozičkom lahko še vedno uporabljate kolesi za ročno upravljanje. e-motion vas spremlja na vsaki poti, lahko ga celo vzamete s seboj na letalo.



Hitro in preprosto: z mehanizmom hitre sprostitve je kolesi e-motion mogoče hitro namestiti in odstraniti.



Popoln nadzor: stikalo za vklop/izklop z magnetno polnilno vtičnico EasyConnex. Vtič polnilnika za akumulator izdelka e-motion samodejno poišče svoj položaj.



Lahko in komaj opazno: predhodno sestavljen nosilec na invalidskem vozičku za postavitev koles e-motion

PREPROSTO UPRAVLJANJE



POPOLN NADZOR, KI GA OMOGOČA ERGONOMSKI SISTEM UPRAVLJANJA (ECS)

Z daljinskim upravljalnikom ECS, ki je na voljo izbirno, lahko e-motion preprosto vklopite in izklopite iz svojega sedeža ter preklapljate med različnima stopnjama podpore za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Za neizkušene uporabnike je na voljo tudi poseben način za učenje, ki vam postopno predstavi upravljanje koles e-motion z nastavitvijo za posebej neovirano vožnjo. Po potrebi lahko uporabite tudi daljinski upravljalnik ECS, da aktivirate patentirano zakasnitev premikanja na kolesih e-motion. Ko pri vožnji po klancu navzgor umaknete roke s potisnih obročev, boste samodejno zadržani na enem mestu za 5 sekund. Tako boste imeli na voljo dovolj časa, da spremenite položaj svojih rok, ne da bi se invalidski voziček prevrnil nazaj.

Daljinski upravljalnik ECS:
preprosto upravljajte kolesi
e-motion iz svojega sedeža



DO POTANKOSTI PRILAGOJENO MENI



PRILAGODLJIVO POSAMEZNIKOM

Izdelek e-motion je prilagodljiv: združljiv je s številnimi modeli invalidskih vozičkov in mogoče ga je prilagoditi glede na potrebe posameznikov. Občutljivost senzorja na potisnem obroču je mogoče ločeno prilagoditi na obeh pogonskih kolesih. Tako da različna moč v rokah ne predstavlja nikakršno težavo. Specializirani prodajalec ali terapevt lahko oceni možnost izvajanja nadaljnjih prilagoditev vašega izdelka e-motion tako, da bo na najboljši način prilagojen vašim potrebam in slogu vožnje. Izdelek e-motion je na voljo v treh velikostih in na zahtevo ga je mogoče opremiti z ergonomskimi potisnimi obroči. Na ta način vam je zagotovljen najboljši oprijem v vseh voznih situacijah.



Občutljivost senzorjev na potisnih obročih je mogoče prilagoditi v sedmih korakih



Prevlečen potisni obroč Qaudro: nadzor in prenos moči tudi pri omejeni funkcionalnosti rok



APLIKACIJA E-MOTION MOBILITY: PAMETEN POMOČNIK NA POTI


Pametni telefoni so postali sestavni del našega vsakdanjega življenja. Ni treba omeniti, da tudi e-motion izkorišča vse prednosti te tehnologije. Brezplačna aplikacija e-motion Mobility zagotavlja več predhodno nastavljenih profilov vožnje:

Standard (standardno): živahno a tudi uravnoteženo upravljanje za vsakogar.

Sensitive (občutljivo): za osebe z omejeno funkcionalnostjo rok in/ali relativno majhno močjo v rokah, ki potrebujejo več pomoči pri poganjanju med vožnjo.

Soft (nežno): za neusposobljene posameznike, ki jim je bolj všeč pasiven slog vožnje.

Active (aktivno): za osebe s polno funkcionalnostjo rok in/ali relativno veliko močjo v rokah, ki želijo bolj športno vožnjo.

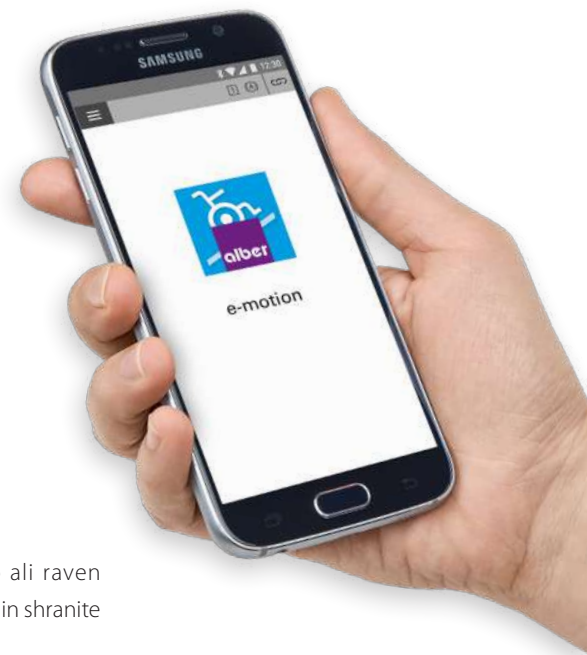

Lahko si ogledate tudi trenutno hitrost, kilometrino ali raven napolnjenosti akumulatorjev e-motion ali celo posnamete in shranite poti prek GPS-a.

Brezplačen prenos



Pri načinu vožnje Cruise so vaše roke proste in lahko se osredotočite na lepše stvari v življenju. Več informacij je na voljo na naslednji strani.



NAJ BODO VAŠE
ROKE PROSTE



PAKET MOBILITY PLUS:

INTELIGENTNE DODATNE FUNKCIJE NA POTI

Naj bosta obe roki med vožnjo prosti, če pa se želite premikati hitreje, poskrbite za dodatno hitrost. S paketom Mobility Plus je mogoče aktivirati več inteligentnih dodatnih funkcij v aplikaciji Mobility. Tako lahko še bolj izkoristite prednosti izdelka e-motion.




PRENESITE CELOTEN PAKET MOBILITY PLUS V SVOJ PAMETNI TELEFON.

329,99 EUR vključno z DDV-jem.

Lahko prihranite 59,95 EUR v primerjavi z nakupom posameznih funkcij.

Na voljo v trgovinah Play
Store in App Store.



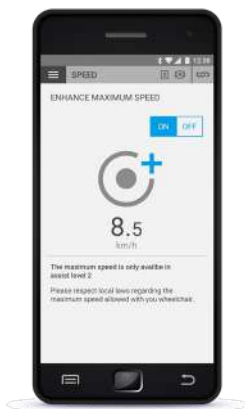

SPEED

- Povečajte največjo podporno hitrost svojega kolesa e-motion s 6 km/h na 8,5 km/h in se hitreje pripeljite do svojega cilja.

Cena: 99,99 EUR vključno z DDV-jem.



REMOTE

- Oddaljeno upravljanje nezasedenega invalidskega vozička prek pametnega telefona, npr. za »parkiranje«
- Upravljanje prek integriranega senzorja nagiba pametnega telefona ali navidezne krmilne palice v aplikaciji

Cena: 39,99 EUR vključno z DDV-jem.



ECS

- Uporaba funkcij daljinskega upravljalnika ECS na pametnem telefonu
- Spreminjanje stopenj pomoči (1, 2 in način za učenje)
- Aktiviranje zakasnitve premikanja

Cena: 99,99 EUR vključno z DDV-jem.



CRUISE

- Popolno za daljše vožnje, potiskanje nakupovalnega ali potovalnega vozička
- Aktivira se, ko je premik med vožnjo nad 2 km/h in to hitrost vzdržuje brez nadaljnjih potiskov (deluje tudi na klancih navzgor in navzdol)
- Hitrost lahko kadar koli povečate prek dodatnih potiskov na potisnih obročih v aplikaciji


Cena: 99,99 EUR vključno z DDV-jem.



EASYNAVI

- Enostavna navigacija od začetne točke do cilja s potmi, ki so dostopne za invalidske vozičke
- Funkcija za uvoz poti (GPX)
- S spremenljivimi govornimi ukazi
- Vir zemljevidov: Open Street Map

Cena: 39,99 EUR vključno z DDV-jem.

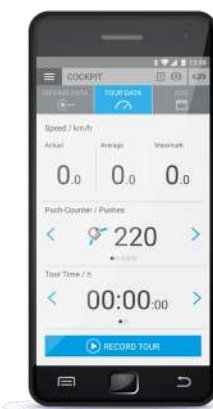

PUSH-COUNTER

- Šteje vaše premike na potisnih obročih e-motion med vožnjo
- Tako lahko ocenite svoje obnašanje med vožnjo in optimizirate svoj slog vožnje

Cena: 9,99 EUR vključno z DDV-jem.

Cene se lahko spremenijo.

NOVIM HEROJSKIM **DEJANJEM** **NASPROTI**



TEHNIČNI PODATKI

Teža na kolo	7,8 kg
Podporna hitrost	Najv. 6 km/h (najv. 8,5 km/h s paketom Mobility Plus)
Doseg	Do 25 km
Moč/moment	80 W/40 Nm na kolo
Največja dovoljena teža uporabnika	150 kg
Največja skupna teža	190 kg
Največja zmogljivost vzpenjanja	Odvisno od uporabljenega invalidskega vozička
Velikosti koles, ki so na voljo	22", 24", 25"
Razpoložljivi dodatki*	Paket Mobility Plus, daljinski upravljalnik ECS, magnetno držalo za daljinski upravljalnik ECS za invalidski voziček, gume Schwalbe Marathon Plus, gume odporne proti predrtnju velikosti 1" iz odpornega poliuretana ali velikosti 1 3/8" z ohišjem in vstavkom iz poliuretana, potisni platišči s prevleko, ergonomski potisni obroči Curve L in Quadro, pokrov napere z okrasom ali brez njega

*Še več dodatkov: www.alber.de



Magnetno držalo za nameščanje daljinskega upravljalnika ECS na invalidski voziček (dodatek)



Potisni obroč Curve-L: ergonomski položaj rok in optimiziran prenos moči za osebe z dobro funkcionalnostjo rok (dodatek)

NA KOLO E-MOTION SE LAHKO ZANESETE

e-motion je izdelek družbe Alber, specializirane za posebej prenosne in uporabnikom prijazne pripomočke za gibanje. Trpežnost, kakovost in zanesljivost izdelka e-motion so preizkusile in ocenile neodvisne ustanove. Za nas so najpomembnejši varnostni preizkusi – tisti, ki jih na primer opravi združenje TÜV: pri družbi Alber boste vedno pridobili izdelke, katerih varnost je preverjena v skladu z najnovejšimi smernicami za medicinske izdelke.

e-motion je odobren medicinski pripomoček. Prodajalec medicinske opreme bo z veseljem odgovoril na vsa morebitna vprašanja o povračilih. Izdelek e-motion je skladen z oznako CE v skladu z Evropsko direktivo o medicinskih pripomočkih (MDR) 2017/745. Prostovoljno ga je preizkusilo in certificiralo združenje TÜV Süd v skladu s trenutno veljavno izdajo standarda EN 12184.

Naše trditve o kakovosti so vaše jamstvo varnosti! Naša družba je certificirana za najnovejši standard upravljanja s kakovostjo (vključno z upoštevanjem najnovejših sprememb), ki je določen v standardu ISO 13485 za medicinske pripomočke. Z uporabo sistema za upravljanje okolja, ki je certificiran v skladu s standardom ISO 14001, zagotavljamo ekološko skladnost proizvodnje naših izdelkov.



Samodejni polnilnik za akumulator: samodejno prilagajanje napetostnemu omrežju in polnjenje obeh akumulatorjev e-motion v samo nekaj urah (priloženo ob dobavi)

»VEDNO BODITE **NA VRHU.**
IZDELEK **E-MOTION** VAM OMOGOČA
TUDI TO. PREIZKUSITE GA.«



34.0004.6.02.02 Izdaja 11/2019 ©Alber GmbH, Albstadt
Lahko pride do tehničnih sprememb.



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 21

72461 Albstadt, Nemčija

Telefon +49 07432 2006-0

Faks +49 07432 2006-298

info@alber.de

VIDEOPOSNETEK O IZDELKU E-MOTION

Optično preberite kodo QR ali vnesite
povezavo:



www.alber.de/e-motion-film